

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ МЕДИЧНОГО “ТУРНИКЕТ КРОВОСПИННИЙ СТО-1” ТУ У 21.20-13429839-008:2022

1. Призначення

Турнікет кровоспинний – медичний виріб одноразового використання, призначений для тимчасової зупинки кровотечі з великих кровоносних судин. Використовується для надання першої медичної допомоги в машинах швидкої допомоги, похідних умовах, під час воєнних дій та інших екстремальних ситуаціях.

2. Спосіб використання виробу

- накладіть петлю джгута на поранену кінцівку вище рани*;
- просмикніть ремінь в скобу, затягніть його до упору;
- проводьте обертання воротка до припинення кровотечі;
- зафіксуйте вороток у скобі планки;
- зафіксуйте вільну частину ремінця, використовуючи застібку велкро;
- заклейте скоби білою липучкою і напишіть час накладання турнікету;
- якщо турнікет накладено, а кровотеча триває, необхідно накласти ще один, перевіряючи пульс.

* Турнікет треба накладати вище місця артеріальної кровотечі, ближче до рани. Правильність накладання турнікету визначають із зупинки кровотечі. Якщо турнікет накладений слабо, кровотеча триває, а шкірні покриви набувають ціанотичне забарвлення. Дуже туге накладення турнікету спричиняє пошкодження нервових стовбурів. Не можна накладати турнікет у середній третині плеча - це може призвести до пошкодження нерва, а також на нижній третині стегна, де для перетискання артерії необхідно значне здавлювання тканин.

3. Вимоги безпеки

Час знаходження джгута на кінцівці - не більше 2 годин, а взимку – 1 година. При більш тривалому часі утримання джгута є небезпека омертвіння тканин знекровленої кінцівки. Подбати про евакуацію потерпілого та надання йому кваліфікованої допомоги.

!! Завжди зберігати турнікет складеним для використання однією рукою!!

4. Правила зберігання

Вироби зберігають у пакуванні підприємства-виробника при температурі від +1 до 35°C у критих складських приміщеннях. Уникайте прямих сонячних променів під час зберігання.

6 Гарантійний термін зберігання

3 роки

Виробник:

*ТОВ «Спецтехоснастка», 51900, Україна, м. Кам'янське, вул. Васильєвська 122,
тел. (0569) 588710*



ТОВ "Спецтехоснастка"
вул. Васильєвська, 122, м. Кам'янське,
Дніпропетровська обл., Україна, 51900
тел: (0569) 588710, www.d-sto.com



Турнікет кровоспинний СТО-1

згідно з ТУ У 21.20-13429839-008:2022



01 04 22 Н



2025 04

Зберігати при температурі від +1 °С до 35 °С у критих складських приміщеннях .

